

# 4. バイタル連携機器の初期設定 (iPadでの設定)

## 4-1 Bluetooth設定 ※「日本精密測器株式会社」のバイタル機器 (専用機種のみ) をご利用の場合

iPad本体の「設定」をタップして、バイタル連携機器を登録します。



- ③ NISSEI機器を選択します。
- ④ 各バイタル機器で確認いただいた4桁の“CNKEY”を入力します。(画像は体温計設定)

各機器の“CNKEY”取得方法は次ページにてご案内します。

⚠️ ※バイタル連携機器は専用機種のみ対応します。


① Bluetoothをオンにします。



② 「機器を利用する」をONにします。



### ワンポイント情報

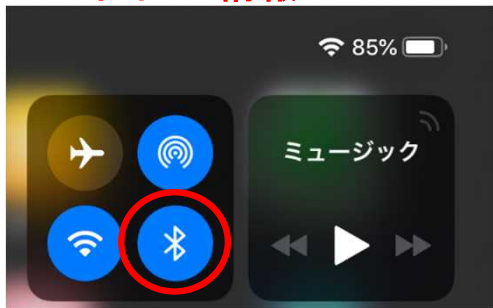

iPadの画面右上から下にスワイプするとコントロールセンターが表示されます。



ボタンが青の状態がONです。



パルスオキシメーター (BO-750BT)



非接触体温計 (MT-550BT)



上腕式デジタル血圧計 (DS-S10-M)



手首式デジタル血圧計 (WS-M50BT)

NISSEI

日本精密測器株式会社


## 4. バイタル連携機器の初期設定 (iPad側で設定が必要です) バイタル連携機器をご利用の場合

### 4-2 “CNKEY”確認手順 ※バイタル連携機器は「日本精密測器株式会社」の専用機種のみ対応します。

#### 上腕式血圧計 (DS-S10-M)



① 血圧計パネル左の【**接続**】ボタンを3秒以上長押ししてください。

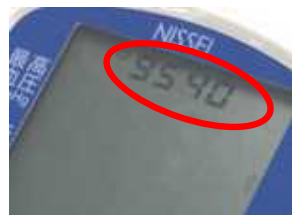

② 液晶上部に4桁のCNKEYが表示されます。この場合は“**9540**”です。

※血圧計はIDモードで使用します。

**NISSEI**  
日本精密測器株式会社

#### 手首式血圧計 (WS-M50BT)



① 上部の▲を長押ししてください。



② CNKEYが表示されます。この場合は“**4403**”です。

※通常の測定通信時にはCNKEYは表示されません。

#### パルスオキシメーター (BO-750BT)



① 本体に指を挟み、測定値の表示後【**側面のボタン**】を3秒以上長押ししてください。



② 測定値とCNKEYが交互に表示されます。この場合は“**7424**”です。

※通常の測定通信時にはCNKEYは表示されません。

#### 非接触体温計 (MT-550BT)



① 体温計の電源がオフの状態、【**モードメモリ**】ボタンを3秒以上長押ししてください。



② CNKEY●●●℃(前回の測定値)が交互に表示されます。この場合は“**9323**”です。

※通常の測定通信時にはCNKEYは表示されません。  
※購入時のみCNKEYと---℃が交互に表示されます。

# 4. バイタル連携機器の初期設定 (iPadでの設定)

## 4-3 Bluetooth設定 ※「オムロン株式会社」のバイタル機器 (専用機種のみ) をご利用の場合

iPad本体の「設定」をタップして、バイタル連携機器を登録します。



①Bluetoothをオンにします。



②「機器を利用する」をONにします。




③標準SIG (GATT) を選択します。

④ログイン画面に戻り、ペアリングを行います。



### ワンポイント情報

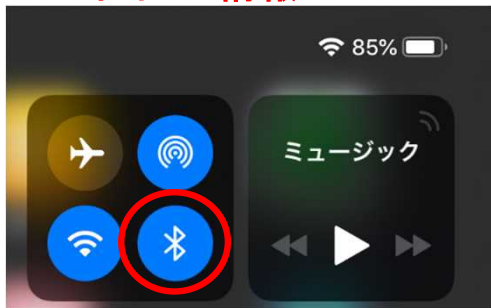

iPadの画面右上から下にスワイプするとコントロールセンターが表示されます。



ボタンが青の状態がONです。



上腕式デジタル血圧計 (HCR-7501T)



自動血圧計 (HEM-6233T)



非接触体温計 (TM-101B PiPi)



体重体組織計 (HBF-227T)