

4. バイタル連携機器の初期設定 (iPadでの設定)

4-1 Bluetooth設定 ※「日本精密測器株式会社」のバイタル機器 (専用機種のみ) をご利用の場合

iPad本体の「設定」をタップして、バイタル連携機器を登録します。



①Bluetoothをオンにします。



②「機器を利用する」をONにします。



③NISSEI機器を選択します。

④各バイタル機器で確認いただいた4桁の“CNKEY”を入力します。
(画像は体温計設定)

各機器の“CNKEY”取得方法は次ページにてご案内します。

⚠️ ※バイタル連携機器は専用機種のみ対応します。



パルスオキシメーター
(BO-750BT)

非接触体温計
(MT-550BT)



上腕式デジタル血圧計
(DS-S10-M)




手首式デジタル血圧計
(WS-M50BT)

NISSEI

日本精密測器株式会社

ワンポイント情報

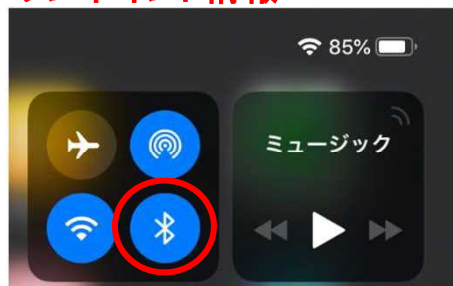

iPadの画面右上から下にスワイプするとコントロールセンターが表示されます。



ボタンが青の状態がONです。

4. バイタル連携機器の初期設定 (iPad側で設定が必要です) バイタル連携機器をご利用の場合

4-2 "CNKEY"確認手順 ※バイタル連携機器は「日本精密測器株式会社」の専用機種のみ対応します。

上腕式血圧計 (DS-S10-M)



① 血圧計パネル左の【**接続**】ボタンを3秒以上長押ししてください。



② 液晶上部に4桁のCNKEYが表示されます。この場合は**"9540"**です。

※血圧計はIDモードで使用します。

NISSEI
日本精密測器株式会社

手首式血圧計 (WS-M50BT)



① 上部の▲を長押ししてください。



② CNKEYが表示されます。この場合は**"4403"**です。

※通常の測定通信時にはCNKEYは表示されません。

パルスオキシメーター (BO-750BT)



① 本体に指を挟み、測定値の表示後【**側面のボタン**】を3秒以上長押ししてください。



② 測定値とCNKEYが交互に表示されます。この場合は**"7424"**です。

※通常の測定通信時にはCNKEYは表示されません。

非接触体温計 (MT-550BT)



① 体温計の電源がオフの状態、【**モードメモリ**】ボタンを3秒以上長押ししてください。



② CNKEY●●℃(前回の測定値)が交互に表示されます。この場合は**"9323"**です。

※通常の測定通信時にはCNKEYは表示されません。
※購入時のみCNKEYと---℃が交互に表示されます。

4. バイタル連携機器の初期設定 (iPadでの設定)

4-3 Bluetooth設定 ※「オムロン株式会社」のバイタル機器 (専用機種のみ) をご利用の場合

iPad本体の「設定」をタップして、バイタル連携機器を登録します。



①Bluetoothをオンにします。



②「機器を利用する」をONにします。



③標準SIG (GATT) を選択します。

④バイタル機器の電源を入れます。
ログイン画面に戻り、ペアリングを行います。



ペアリングするバイタル機器をタップします。


④



オムロン株式会社



ワンポイント情報

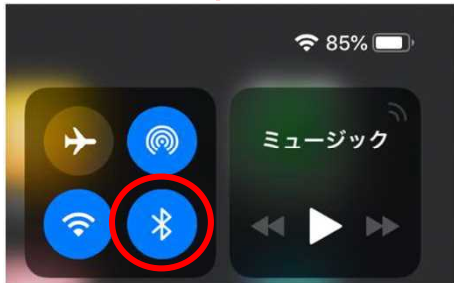

iPadの画面右上から下にスワイプすると
コントロールセンターが表示されます。



ボタンが青の状態がONです。



上腕式デジタル血圧計
(HCR-7501T)



自動血圧計
(HEM-6233T)



非接触体温計
(TM-101B PiPi)



体重計
(HN-300T2)



パルスオキシメーター
(HPO-300T)